

新生児 体温低下防止用スーツ

neohelpTM

ネオヘルプTM



安心の
医療機器

医療機器届出番号
27BIX00117000014

確実な
体温保持
機能

ケアを
妨げない
面ファスナー

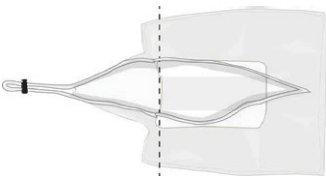
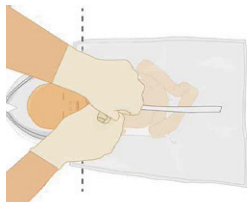
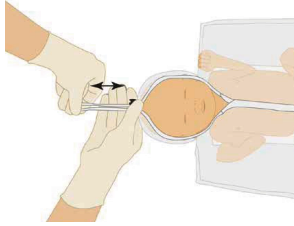
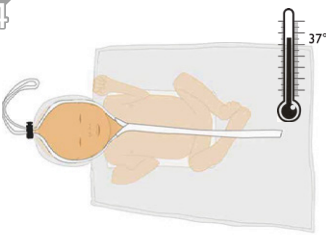
滅菌済み

シングルユース



生まれたばかりの新生児を包む 体温低下防止用スーツ

neohelp™ 使用方法

<p>1</p>  <p>ラジアントウォーマーのもとで 平らな面にネオヘルプを広げます。</p>	<p>2</p> <p>※皮膚を乾燥させない</p>  <p>新生児の両肩をフォームの端にそろえて 寝かせ、面ファスナーを開けて密閉します。</p>
<p>3</p>  <p>新生児の頭部にフードを合わせ、気道を 塞がないように注意して調節します。</p>	<p>4</p>  <p>新生児集中治療室へ入室し、 体温を調べるまでネオヘルプで包んで おきます。</p>



調節可能なフード

- 通気性のある既存のメリヤス編みのキャップよりも保温効果が見込めます。
- 新生児の頭部にフィットするアジャスター付きフードです。



二重構造ポリエチレン

- 温室効果を高めます。
 - 保温器の放射熱を通します。
 - 薄い内面層が皮膚に密着し、熱の損失を防ぎます。
 - 国際規格 (ISO-10993-1) に従って生物学的安全性評価を実施した材料を採用。
- *ISO-10993 とは「医療機器の生物学的評価」についての国際的な規格



プレシェイプド フォーム

- 安定して新生児を置くことができます。
- 新生児の姿勢を保持し、移動させるときに役立ちます。



ケアが容易な面ファスナー

- 容易に素早く新生児をスーツの中に入れることができます。
- モニター機器の装着やアンビリカルカテーテル、IVカテーテルの挿入を考慮したデザインです。

10枚/箱

製品コード	製品サイズ	体重
37.09.14	Sサイズ (長さ38cm×幅30cm)	1kg未満
37.09.15	Mサイズ (長さ44cm×幅38cm)	1kg~2.5kg
37.09.16	Lサイズ (長さ50cm×幅38cm)	2.5kg以上

医療機器届出番号：27B1X00117000014